


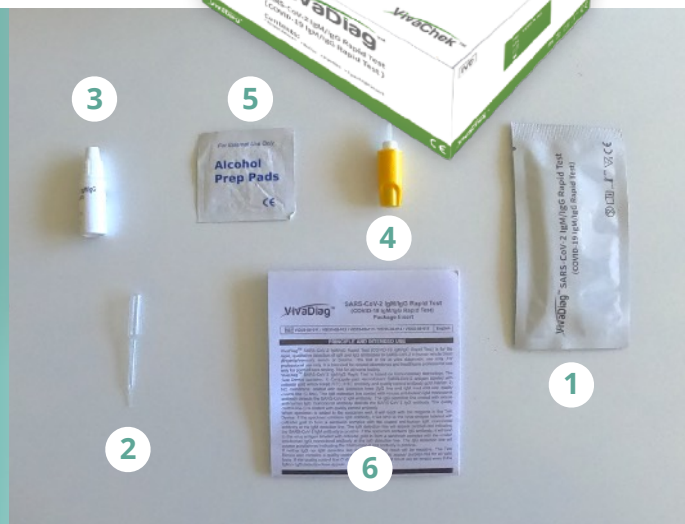

Présentation du matériel

- 1 1 sachet aluminium hermétiquement fermé contenant : 1 test et 1 sachet desséchant ;
- 2 1 pipette en plastique ;
- 3 1 échantillon diluant ;
- 4 1 lancette stérile à usage unique ;
- 5 1 lingette alcoolisée ;
- 6 1 mode d'emploi.



Comment se tester ?

1

Préparer le matériel

Sortir l'intégralité du matériel de son emballage et le disposer devant soi.

2

Masser le doigt

Masser le doigt afin de faciliter la circulation du sang.

3

Désinfecter le doigt

Utiliser la lingette alcoolisée pour désinfecter le doigt. Ne pas oublier de nettoyer sous l'ongle.

4


Préparer la lancette

Tourner le bouchon bleu de la lancette puis tirer délicatement.




Prélèvement

A l'aide de la lancette, se piquer au bout du doigt.

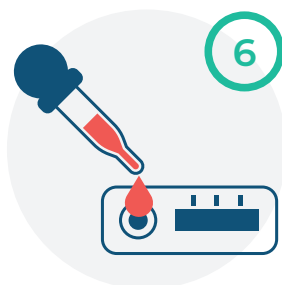


Dépot

Avec la pipette, prélever 1 goutte de sang sur le test et les déposer dans le puit prévu à cet effet.

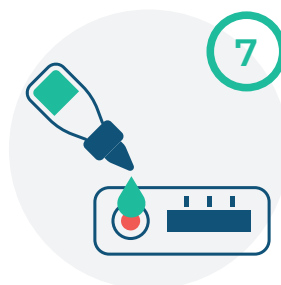

Dilution

Ajouter 2 gouttes de diluant sur le test

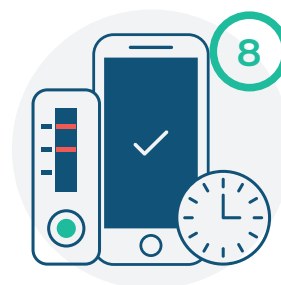

Lecture

Après 10 minutes d'attente, lire le résultat.

Lire le résultat

Les tests détectent 2 types d'anticorps réactifs face à la présence du virus dans notre organisme : l'IgG et l'IgM. La présence d'IgM est un indicateur d'une infection à un stade précoce. La présence d'IgG est un indicateur d'infection à un stade avancé (environ 14-20 jours après l'infection).


L'écran de lecture des résultats du test se compose de 3 barres horizontales : une barre sert de contrôle du test (C), une autre barre révèle la présence de l'anticorps IgM (M) et la dernière celle de l'anticorps IgG (G).

Différentes lectures du test possibles




Test non concluant

La barre de contrôle n'apparaît pas, le sang n'a pas migré jusqu'en haut du test.

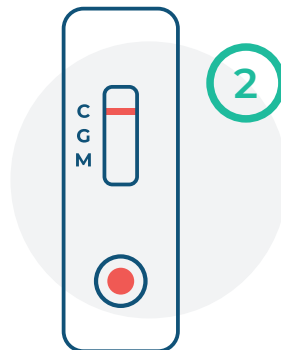


Résultat négatif

Aucune présence d'anticorps.

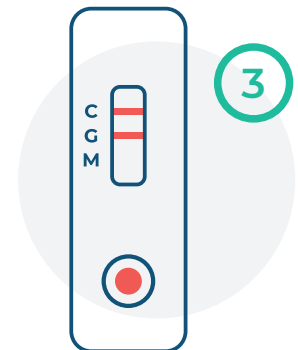


Résultat positif

Contamination, présence de l'anticorps (G).

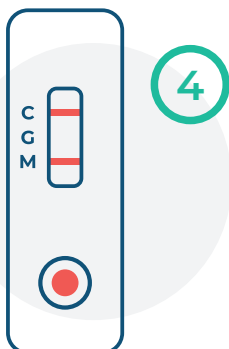

Résultat positif

Contamination, présence de l'anticorps (M).

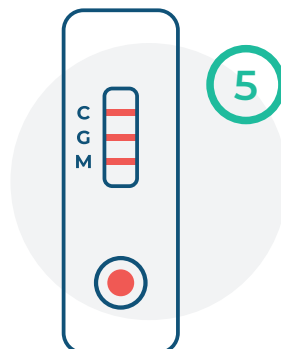

Résultat positif

Contamination, présence des 2 anticorps (M et G).

Résultat négatif

Si l'écran affiche un résultat négatif, cela veut dire que votre corps n'a pas produit d'anticorps au virus.

Résultat positif

Si l'écran affiche un résultat positif, cela veut dire que votre corps a produit un ou deux anticorps au virus. Vous êtes peut-être contagieux, **consultez votre médecin.**